

Kommunikationstavler for ALS til udskrivning

Instruktioner

Disse kommunikationstavler, der kan printes ud, giver mulighed for at støtte en person med en sygdom, der nedsætter tale og bevægelse, som for eksempel ALS. Tavlerne kan bruges, når en ASK-talemaskine ikke er tilgængelig.


Hvis den kommunikerende person ikke selv kan udpege på tavlerne, kan man bruge partnerassisteret scanning, en metode til alternativ kommunikation, hvor en partner præsenterer valgmulighederne sekventielt, indtil den kommunikerende person udtrykker sit behov eller sin præference.

Før man bruger disse tavler, skal den kommunikerende person og partneren blive enige om, hvordan man signalerer et "ja". Det kan være et ansigtsudtryk, et blink med øjnene, en gestus eller en stemme - alt efter hvad der føles mest behageligt for den kommunikerende person.

Smerteskala

Smerteskalaen går fra 0 til 5, hvor 0 repræsenterer ingen smerte og 5 repræsenterer intens smerte.

Brugeren kan enten pege på tallet eller partneren kan sige hvert tal højt, indtil brugeren indikerer et "ja".

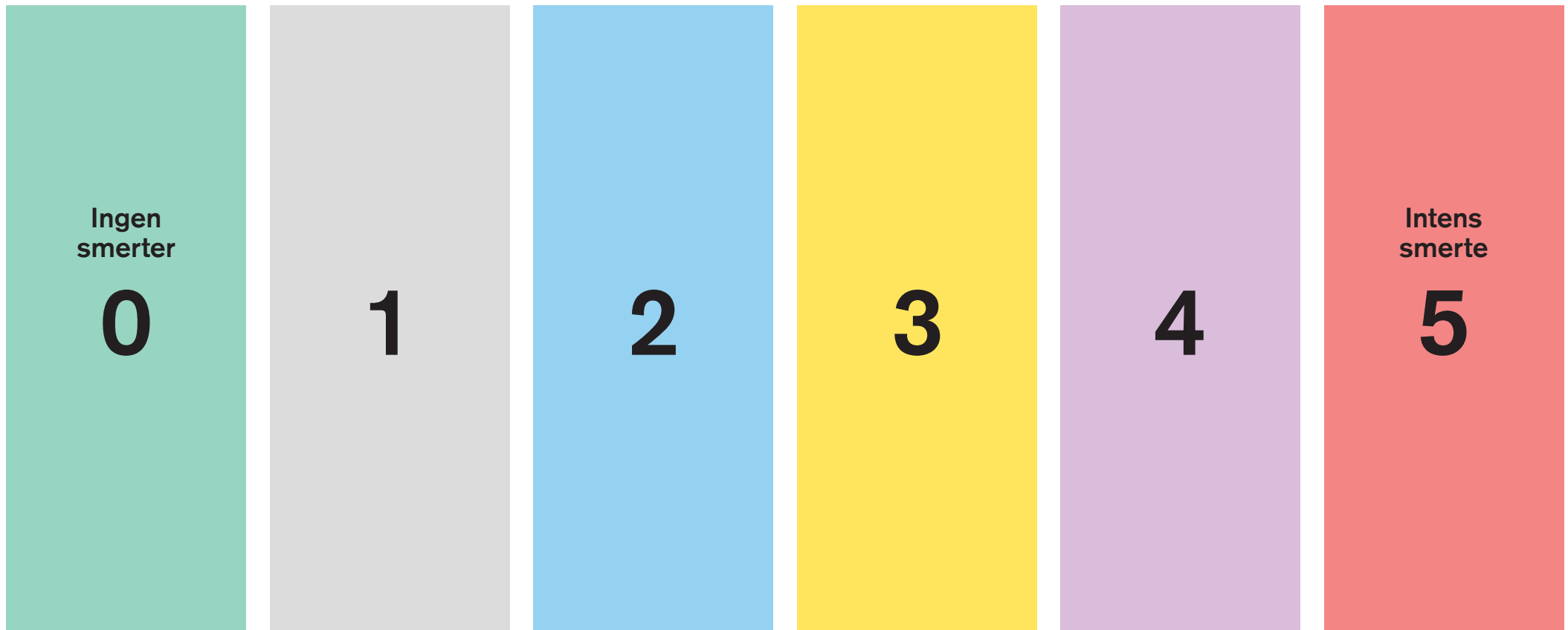

Partnerassisteret stavetavle

Dette er et kommunikationssystem, der omfatter bogstaver eller beskeder, som en partner læser højt for en bruger, der træffer valg ved hjælp af et fastlagt signal. En bruger, der kan bruge sine fingre, kan pege for at vise sit valg. Vi har udviklet to muligheder. Vælg den, der fungerer bedst for dig.

1. Partneren går gennem linjerne ved at pege eller tale for at spørge, om bogstavet eller beskeden er i hver linje, og sørger for at holde pause mellem linjerne.
2. Brugeren siger "ja", når partneren når til den linje, der indeholder det rigtige valg.
3. Hvis brugeren er tryk ved, at partneren gætter, kan partneren gætte ordet, efter at to bogstaver er blevet givet.
4. Hvis der ikke opnåes noget svar, skal partneren gå igennem bogstaverne og bede brugeren om at fortsætte med at stave.

A	B	C	D	Mellemrum	Fejl
E	F	G	H	Hjælp	Slut
I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z
Æ	Ø	Å			

A	B	C	D	Mellemrum	Fejl
E	F	G	H	Hjælp	Slut
I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T
U	V	W	X	Y	Z
Æ	Ø	Å			

Partnerstøttet

Dette er et kommunikationssystem, der omfatter bogstaver eller beskeder, som en partner læser højt for en kommunikator, der træffer valg ved hjælp af et fastlagt signal. En kommunikator, der kan bruge sine fingre, kan pege for at vise sit valg. I de tomme felter skriver du personlige valg, der passer ind i hver kategori.

1. Partneren nævner emner i begyndelsen af hver linje og holder pause mellem dem.
2. Formidleren siger "ja", når partneren når til det ønskede emne.
3. Partneren nævner derefter hver mulighed inden for emnet med en pause mellem hver mulighed.
4. Formidleren siger "ja", når partneren når frem til den ønskede mulighed.

Nødsituation	Ude af stand til at trække vejret	Kvælning	Smerte	Badeværelse	Syg		
Behov	Hvil	Pause	Ro	Repositionering	Familie		
Bevægelse	Krop	Hoved	Arme	Ben	Hofter	Kørestol	
Følelser	Godt	Dårligt	Bekymret	Glad	Trist	Nedtrykt	Begeistret
Aktiviteter	Se TV	Læsning	Film	Besøg	Udendørs gåtur	Tage en lur	Sociale medier
Mennesker							

E-Tran Tavle

E-tran står for Eye Transfer. En E-tran-tavle er et kommunikationssystem, der gør det muligt for mennesker at træffe valg med øjnene.

Hver E-tran-tavle i dette dokument skal bestå af to sider, der spejler hinanden. For at se, hvor brugeren kigger hen, skal partneren placere dem ryg mod ryg.

1. Partneren klipper midten af de to spejlede sider ud og placerer dem ryg mod ryg.
2. Partneren og brugeren etablerer øjenkontakt gennem åbningen i midten.
3. Brugeren kigger på gruppen af bogstaver eller ord, som er valgt, i ca. 3 sekunder.
4. Partneren peger på gruppen og beder brugeren om at bekræfte "ja" (hvis der ikke gives noget svar, skal brugeren se på gruppen af bogstaver eller ord, der indeholder deres valg, igen i ca. 3 sekunder).
5. Brugeren kigger på farveblokken med det ønskede bogstav eller ord i ca. 3 sekunder.
6. Partneren peger på den valgte farveblok og beder brugeren om at bekræfte "ja".

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Klip denne del ud

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Forkert bogstav eller ord

Begynd forfra

Ende

Mellemrum

Nej

Ja

J

I

F

E

B

A

L

K

H

G

D

C

R

Q

T

S

Klip denne del ud

N

M

P

O

Mellemrum

Ende

Ja

Nej

Z

Y

Begynd
forfra

Forkert
bogstav
eller ord

V

U

X

W

Mad

Glad

Drikke

Trist

Hjælp

Vred

TV

Varmt

Musik

Koldt

Film

Syg

Skær denne del ud

Mere

Tavle

Stop

Bekymret

Smerte

Fjollet

Spil

Smerte

Lur

Læsning

Udenfor

Træt

Vred

Hjælp

Trist

Drikke

Glad

Mad

Syg

Film

Koldt

Musik

Varmt

TV

Klip denne del ud

Fjollet

Smerte

Bekymret

Stop

Tavle

Mere

Træt

Udenfor

Læsning

Lur

Smerte

Spil

Smerte

Position

Vejrtrækning

TV

Klip denne del ud

Andet

Seng

Behov

Stave

Vejrtrækning

Position

Smerte

Andet

Klip denne del ud

TV

Stave

Behov

Seng

